


ALLGEMEINE INFORMATIONEN ZUR PUMPE

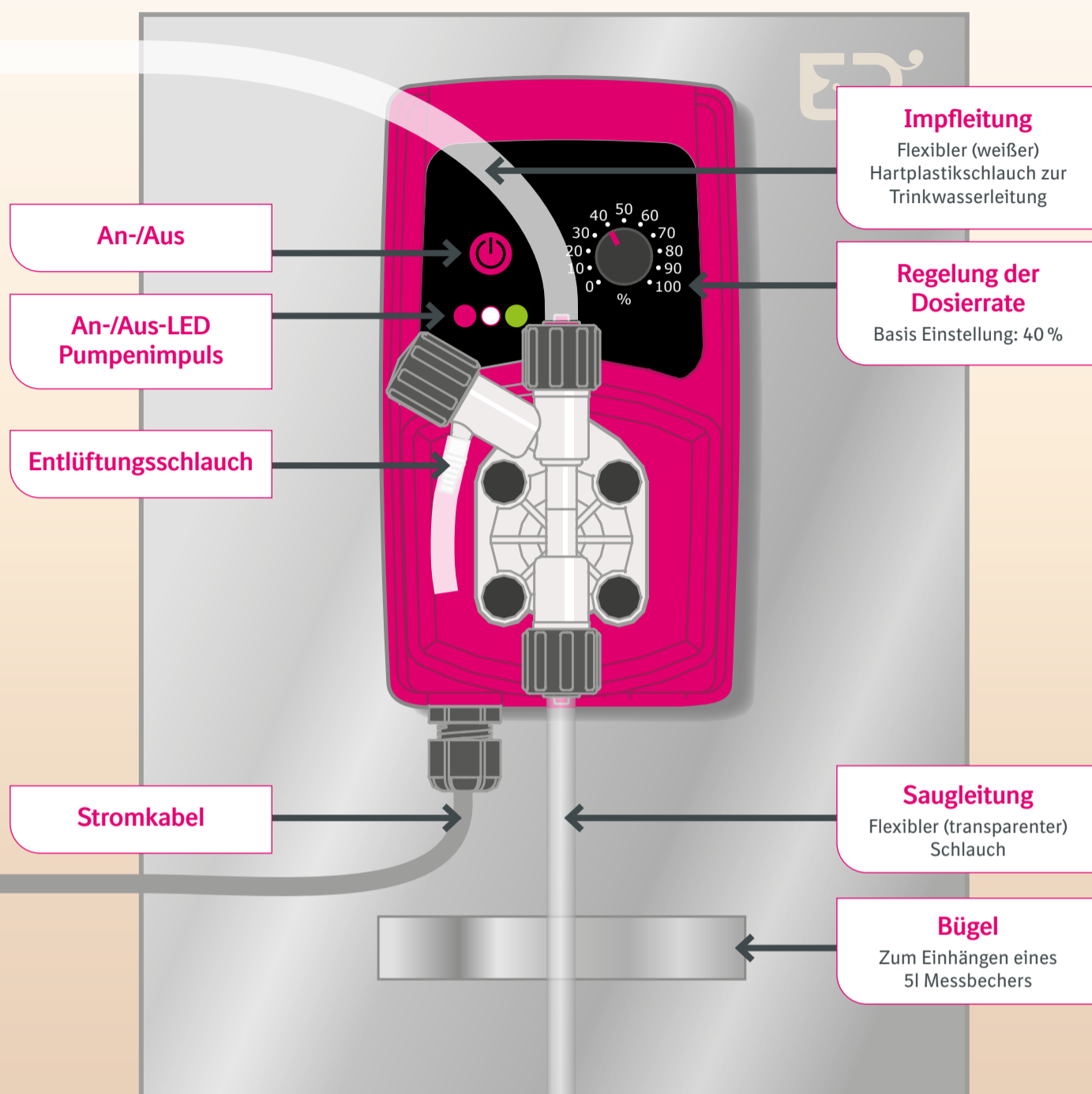

WIE SCHLIESSEN SIE DIE PUMPE AN?




Schläuche montieren

Führen Sie folgende Schritte sowohl für die Saugleitung als auch für die Impfleitung durch:


1. Überwurfmutter auf den Schlauch schieben
2. PVC-Klemmring auf den Schlauch schieben
3. PVC-Schlauchanschluss in den Schlauch drücken
4. Mit der Überwurfmutter fest anziehen.

Ziehen Sie die Impfleitung (weißer Hartplastikschlauch) fest an (5 bis 8 bar Druck).

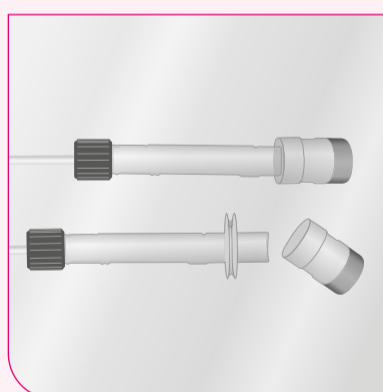

Messbecher vollständig ausleeren

Entfernen Sie das Gegengewicht mit Filter vom Saugkopf. So wird die Stammlösung vollständig dosiert und es bleiben keine Restmengen im Messbecher.

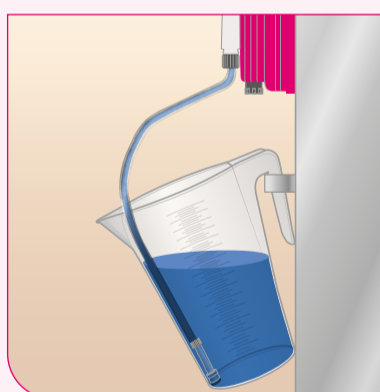


Saugschlauch aufsetzen

Stellen Sie die Länge der Saugleitung so ein, dass der Saugkopf am Boden des Messbechers verbleibt. Schneiden Sie dafür ein Stück flexiblen Schlauch von ca. 40 cm ab.



Entlüften

- Kleines Stück Saugschlauch an das Entlüftungsventil montieren
- Entlüftungsschraube öffnen
- Flüssigkeit mit einer Spritze ansaugen, bis die Pumpe flüssigkeitsgefüllt ist
- Entlüftungsschraube wieder fest anziehen.

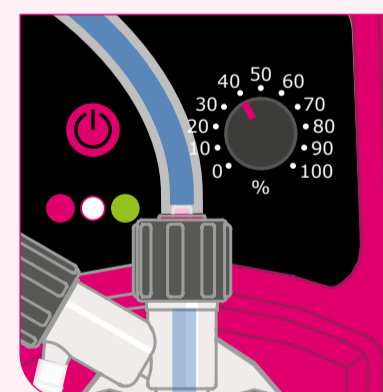

Pumpe einstellen

Dosierate auf 40 % einstellen




Fragen? Benötigen Sie einen Impfcheck?
Gehen Sie auf www.ileitis.de unter Service finden Sie Ihre Ansprechpartner.

Lesen Sie die Anweisungen vor dem Gebrauch.



LAGERUNG

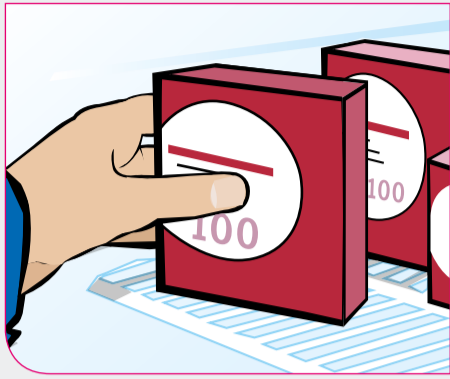

Der Impfstoff muss nach der Lieferung sofort in einem Kühlschrank bei 2 - 8° C gelagert werden.

EMPFEHLUNG

1

Planen Sie die Ileitis Impfung in der aktiven Phase der Schweine. Gut geeignet ist die Zeitspanne zwischen 10 Uhr und 16 Uhr. Beginnen Sie in jedem Fall am Vormittag.

2

Schweine vor der Impfung nicht dürsten lassen.

3


Die Pumpe sollte nur für die Ileitis Impfung verwendet werden.

VOR DER IMPFUNG



Schritt 1

Stellen Sie sicher, dass die Schweine 3 Tage vor der Impfung, am Tag der Impfung und 3 Tage nach der Impfung **keine Antibiotika** erhalten.

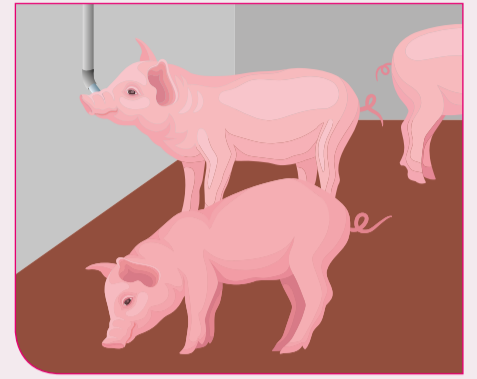

Schritt 2


Alle Zudosierungen zum Trinkwasser mindestens 12 Stunden vor der Impfung abstellen.

TAG DER IMPFUNG



Schritt 3

Füllen Sie den Messbecher mit 1 Liter kaltem Leitungswasser.

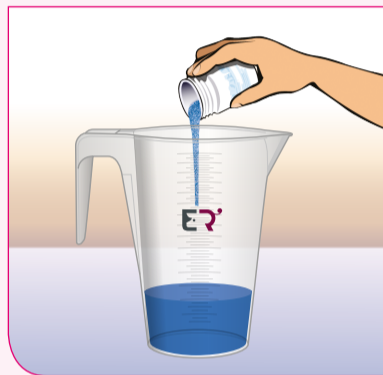

Schritt 4

Geben Sie Thiosulfate Blue zu. Leiten Sie die benötigte Menge von folgenden Anhaltspunkten ab:
für 400 abgesetzte Ferkel (15kg)
1 gestrichener Deckel des Thiosulfate Blue-Behälters oder für 300 Mastschweine (25kg)
1/2 Thiosulfate Blue-Behälter.

ACHTUNG: NICHT OHNE THIOSULFATE BLUE IMPFEN!




Schritt 5

Lösen Sie den Impfstoff mit Hilfe des mitgelieferten Lösungsmittel auf. Bei Verwendung einer Transfernadel ist es wichtig, zuerst die Lösungsmittelflasche zu durchstechen. Gut schütteln und den aufgelösten Impfstoff sofort verwenden.




Schritt 6

Fügen Sie die komplette Anzahl Impfdosen entsprechend der Anzahl zu impfender Schweine zur blauen Vormischung hinzu.

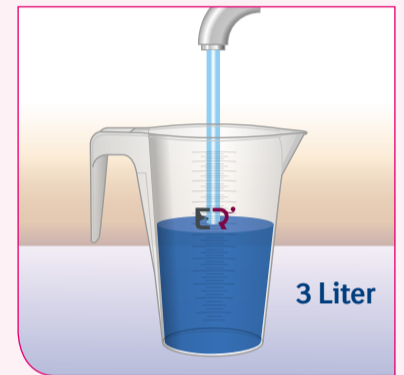


Schritt 7

Füllen Sie die Vormischung mit kaltem Leitungswasser auf ein Gesamtvolumen von 3 l auf.

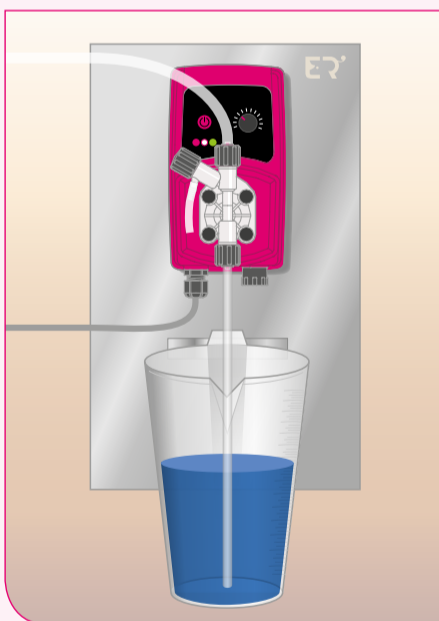


Schritt 8

Hängen Sie den Messbecher an die Platte unter der Pumpe. Legen Sie das Ende des Saugschlauchs an der tiefsten Stelle in den Messbecher.

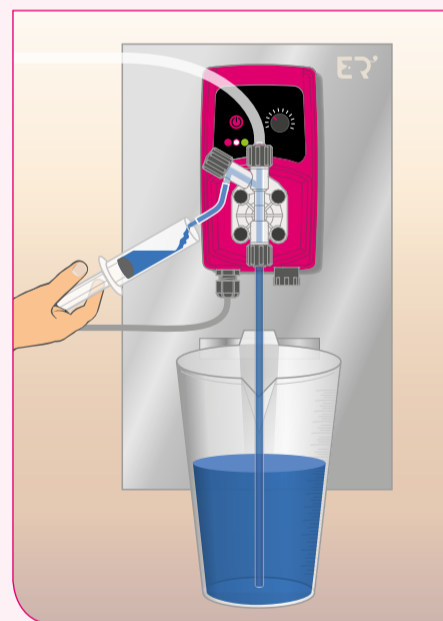


Schritt 9

Entlüften Sie die Pumpe mit einer Spritze.

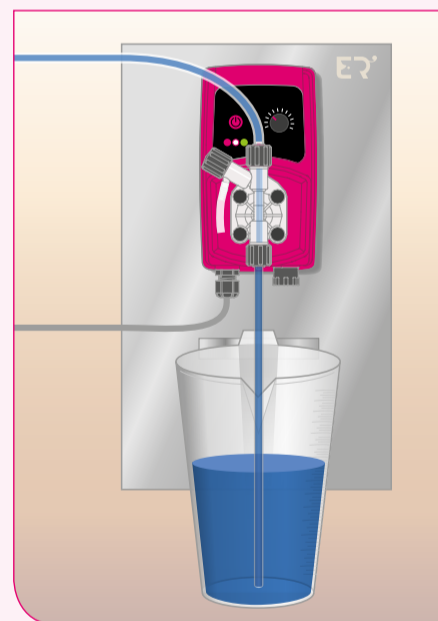

Schritt 10

Stellen Sie sicher, dass die Ileitis Pumpe das richtige Abteil mit dem impfstoffhaltigen Wasser versorgt. Schalten Sie die Pumpe ein. Es ist nicht notwendig, an den Tränkenippeln Wasser abzulassen, um den Impfvorgang schneller zu starten.

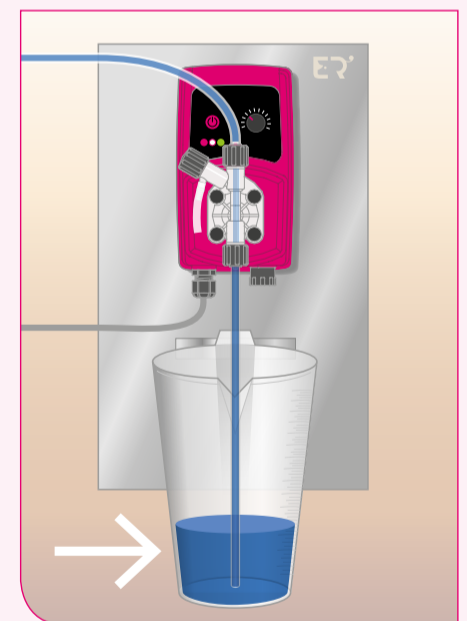

Schritt 11

Kontrollieren Sie die Dosierung der Impflösung. Die Ileitis Pumpe soll stündlich ca. 0,5 Liter Impflösung dosieren, damit der Impfstoff über ca. 6 Stunden ausdosiert wird. Ist dies nicht der Fall beachten Sie bitte die Hinweise s.u.*

* Wird die Impfdauer von 6 Stunden deutlich überschritten -> erhöhen Sie bitte die Dosierung auf mehr als 40% (Empfehlung in max. 5% Schritten).
Wird die Impfdauer von 6 Stunden deutlich unterschritten -> reduzieren Sie bitte die Dosierung auf weniger als 40% (Empfehlung in max. 5% Schritten)

REINIGEN

Schritt 12

Lassen Sie klares Leitungswasser durch die Impfpumpe laufen. Reinigen Sie den Messbecher nur mit Wasser. Verwenden Sie Ileitis Pumpe und Messbecher nur für die Schluckimpfung.

Schritt 13

Zudosierungen zum Trinkwasser können am **Folgetag** wieder eingeschaltet werden.



Fragen? Benötigen Sie einen Impfcheck?
Gehen Sie auf www.ileitis.de unter Service finden Sie Ihre Ansprechpartner.
Lesen Sie die Anweisungen vor dem Gebrauch.